



Vejledning til kogt afkølet vand

Formål:

Forebygge, at patienter påføres infektion i forbindelse med anvendelse af kogt afkølet vand til maskerespiratorterapi i hjemmet.

Fremgangsmåde:

Kogt afkølet vand sidestilles med sterilt vand - fremgangsmåden er som følger:

- Kog almindeligt postevand i gryde eller elkedel.
- Lad vandet afkøle.
- Vandet hældes i en ren, skoldet opbevaringsbeholder med tætsluttende låg med det samme. Det kogte afkølede vand opbevares i køleskabet.
- Vandet har en holdbarhed i beholderen på max 24 timer.
- Det kogte afkølede vand anvendes til fugterbehandling og evt. rengøring af medicinforstøver.
- Det er vigtigt, at vandet er tilstrækkelig afkølet inden det anvendes til procedurer.

Rengøring af beholder til kogt afkølet vand:

Beholderen rengøres minimum dagligt eller når den er tom. Rengøres hyppigere, hvis den er synligt forurenet.

- Beholderen / flaske til opbevaring af kogt afkølet vand skal kunne vaskes indvendigt mekanisk ved hjælp af en opvaskebørste eller flaskerenser. Beholderen rengøres på ydersiden med en hårdt opvredet klud. Der anbefales et mildt opvaskemiddel, som er parfumefrit og allergitestet. Beholderen tørres straks med et rent viskestykke.
- Alternativt anskaffes en beholder, der kan gå i opvaskemaskinen på 55 grader.
- Herefter skoldes beholderen, og tømmes for vand fra skoldningen, inden det kogte vand hældes i.