


CPAP/BIPAP m. fugter - plan for rengøring

Udarbejdet med afsæt i Respirationscenter Vests instrukser samt brugermanualer

Hver dag:

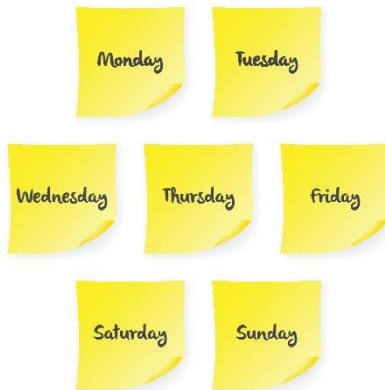

- Tøm fugter for vand
- Tør fugter grundigt med éngangsklud (fx ren køkkenrulle)
- Vask pande og ansigtspuder til maske (må ikke ligge i blød)
- Kog nyt vand til fugteren
- Køl vandet af
- Opbevar vandet i køleskab i ren, skoldet beholder med låg
- Hæld vand på fugteren inden brug

Hver uge - oftere ved synlig forurening



- Tør apparatet af udvendigt med hårdt opvredet sæbeklud – eller engangsklud med sæbe (fx grøn wipe)
- Vask fugterkammer
- Vask luftslange
- Vask maske
- Vask "headgear"

Udstyr rengjort d. _____

Rengøres næste gang d. _____



Hver 2. uge

- Tilse éngangsfilter
- skiftes hvis det er misfarvet, tilstoppet med snavs/støv eller hullet.
- Tilse og rens et evt. flergangsfilter

Filtre tilset d. _____

Tilses næste gang d. _____



Hvert ½ år:

- Skift filtre

Filtre skiftet d. _____

Skiftes næste gang i ____/____ måned/år