

Procedurebeskrivelse	DYRKNING AF SPOREPRØVER
Formål	Reducere risiko for infektionsspredning
Målgruppe	Den der er ansvarlig for dyrkning
Udføres	Ved behov
fremgangsmåde	1. Ampuller modtages og registreres 2. sættes i Attest Steam incubator 56 grader og glasset knuses 3. test ampul sættes i 4. første aflæsning efter 24 timer 5. endelig aflæsning efter 48 timer. 6. Kontrolampul skal blive gul og hvis autoklaven er i orden forbliver de autoklaverede ampuller lilla 7. resultat føres ind i test skema for de respektive klinikker 8.
Procedure revurderes	Hvert 3. år og når der kommer ændringer til retningslinje

Udarbejdet af Marianne Hasager Nielsen 13. 03. 2015.

Revideret april 2020