

Procedurebeskrivelse	STERILISERING I LISA OG MELAG AUTOKLAVE
Formål	Reducere risiko for infektionsspredning
Målgruppe	Alle klinikassistenter der arbejder på klinikken
Udføres	Ved behov
Fremgangsmåde	1. handsker på 2. Efter endt opvask stilles bakkerne på et rent viskestykke 3. De instrumenter der kommes i poser, datomærkes 4. Kassetter skal kommes i autoklaveposer og datomærkes 5. Bor efterses og kommes i pose 6. Instrumenter der ikke kommes i pose lægges på bakke i et enkelt lag. 7. kassetter/poser og bakker med instrumenter sættes ind, poser skal vende med papirside op og lægges i et enkelt lag. 8. autoklaveres ved 134 grader 9. BW holdere, masker til lattergas, vatruller, gazekrøller køres ved 121 grader 10. handsker af
Kontrol af autoklave	<i>Daglig kontrol af autoklave:</i> • 2 stk TST strimler placeres to forskellige steder i autoklaven. Hvis man kører både 121/134 grader skal der køres 2 strimler på hvert program. • Det indføres i logbog på f-drevet. <i>Ugentlig kontrol af autoklave:</i> • Autoklavekammer afvaskes <i>1 gang om måneden:</i> • Attest sporeprøver mærkes og placeres forskellige steder i autoklaven i kassetter/poser • Det indføres i logbog på F-drevet
Procedure revurderes	Hvert 3. år og når der kommer ændringer til retningslinje