

Rengøring af DreamStation Bipap maskerespirator

Supplerende vejledning ved respiratorisk overvågning

Formål:

Forebygge at patienter påføres infektion i forbindelse med maskerespiratorbehandlingen. Samt sikre korrekt vedligeholdelse af apparatur.



Dreamstation Bipap med fugter

Fremgangsmåde:

Apparatur / Bipap:

Selve apparaturet rengøres med en hårdt opvredet blød klud i uparfumeret sæbevand - minimum 1 gang i måneden. DreamStation Bipap tåler ikke vand i de indvendige dele, så pas på med mængden af vand.

Filter:

Filtret tjekkes / kontrolleres hver 14. dag. Dette er et engangsfilter. Filtret skiftes minimum hvert halve år - eller oftere, hvis det bliver misfarvet, tilstoppet med snavs og støv eller hullet.

Ved anvendelse af hvidt allergi filter tilses dette hver 14. dag. Filtret skiftes minimum hvert halve år - eller oftere, hvis det bliver misfarvet, tilstoppet med snavs og støv eller hullet

Til rengøringen klargøres en balje med sæbevand, samt rene viskestykker. Der anbefales et mildt opvaskemiddel, som er parfumefrit og allergitestet. Det anbefales at anvende værnemidler ved rengøring og håndtering af slange og fugterkammer.

Slangesæt:

Slange rengøres 1 gang ugentligt samt ved synlig forurening.

- Slangen lægges i sæbevand. Alle dele skal være under vand, og der skal være vand inde i slangerne. Slangen skal ligge i blød i 15 min.
- Slangen skylles grundigt, så de er helt fri for sæberester. Vær opmærksom på at slangerne ikke må røre urene områder under processen.
- Slangen tørres indenfor ½-1 time. Der kan bruges en føntørre med kold luft. Vær opmærksom på, at tørre grundigt. Herefter skal slangen ligge imellem et rent viskestykke eller håndklæde til lufttørring i 1 time, inden det må samles og sættes retur på

DreamStation Bipap. Dette er for at sikre at slangesættet er helt tørt, og dermed mindske risikoen for bakterievækst i slangesættet.

Fugterkammer:

- Tømmes dagligt for vand og tørres med en ren fnugfri klud.
- Rengøres grundigt 1 gang ugentligt samt ved synlig forurening.
- Det er kun den udtagelige del af fugterkammeret / selve beholderen, der kan rengøres. 
- Fugterkammeret skilles ad og rengøres mekanisk ved brug af opvaskebørste.
- Skylles grundigt, så kammeret er helt fri for sæberester.
- Fugterkammeret tørres indenfor ½-1 time med et rent viskestykke. Herefter skal fugterkammeret ligge imellem et rent viskestykke eller håndklæde til lufttørring i 1 time. Dette er for at sikre at fugterkammeret er helt tørt, og dermed mindske risikoen for bakterievækst.

Afkalkning af fugterkammer:

Kalkaflejringer i fugterkammeret fjernes med almindelig husholdningseddike (uden farve), der blandes 1:10.

Blandingen skal stå i ca. 30 minutter, hvorefter fugterkammeret rengøres som beskrevet ovenfor.

Udskiftning af slangesæt og fugterkammer:

Ved meget svære kalkaflejringer eller anden beskaftenhed, der hæmmer, at man kan se synlig forurening og snavs, kasseres slangen og fugterkammeret.