

Procedurebeskrivelse	DESINFEKTION I DENTALOPVASKEMASKINE
Formål	Reducere risiko for infektionsspredning
Målgruppe	Alle klinikassistenter der arbejder på klinikken
Udføres	Ved behov
Fremgangsmåde	Brug handsker 1. læg BW holdere, tænger, elevatorer, masker til lattergas på bakke for sig selv. 2. læg andre instrumenter i kurv/bakke i et jævnt lag, vandpåvirkning af alle flader sikres. 3. Kom bor i lille lukket si. 4. Bakkerne placeres i opvaskemaskinen, så de ikke går ind over hinanden. 5. Handsker af 6. hånddesinfektion
Kontrol af opvasker	Dagligt kontrolleres 1. at der ikke ligger ting i bunden af opvasker 2. at sien er rensset
Procedure revurderes	Hvert 3. år og når der kommer ændringer til retningslinje

Udarbejdet af Marianne Hasager Nielsen 13. 03. 2015.

Revideret april 2020