

Udarbejdet af: Specialtandlæge Milo Kirk & Tom Kjellerup	Revisionsansvarlig: Specialtandlæge Milo Kirk & Tom Kjellerup	Gældende for: Klinikassistenter og tandplejere ved uddelegering
Gældende fra: 1-5-2023	Version: 3.	Ny revision senest: 1-5-2026

Instruks til brug af Trios Scanner til fremstilling af 3D modeller

1. Formål

Fremstille 3D-modeller til diagnostisk brug for ortodontisk behandlingsplanlægning

2. Målgruppe og anvendelsesområde

Børn og unge som tilbydes observation eller ortodontisk behandling

3. Forudsætninger

- Teoretisk undervisning ved instruksen
- Sidemandsoplæring under supervision

4. Fremgangsmåde

Når en specialtandlæge vurderer, at patienten skal tilbydes materialeoptagelse eller har behov for studiemodel, følges nedenstående procedure:

1. Tænd for skanneren 10 minutter før brug, for at systemet kan varme op
2. Udskift beskyttelseshætte med ren og steril skanner tip med spejl
3. Find og åbn den aktuelle patient i kalenderen
4. Tryk på Scan knappen og vælg overkæbe
5. Pust tørt med trefunktionsspids
6. Placer skannertip okklusalt på 1. molar og aktiver skannerknap på skannerpistol
7. 1 Skan alle okklusalflder, se med på skærm, zigzag med skanner i incisiv området
8. 2 Skan alle lingualflader og lingual gingiva
9. 3 Skan alle bukkal flader og buccal gingiva
10. Underkæbe skannes på tilsvarende måde
11. Skan sammenbid bukkalt fra med lukket mund i normalt sammenbid indtil modeller lukker på skærmen
12. Send Skan til MK/TK

