

CPAP u. fugter – plan for rengøring

Udarbejdet i overensstemmelse med RRA, Fysioterapiens patientvejledning.



Hver uge - oftere ved synlig forurening



- Tør apparatet af udvendigt (incl. bakteriefilter + ventil/modstand) med hårdt opvredet sæbeklud – eller engangsklud med sæbe (fx grøn wipe)
- Vask maske
- Vask luftslange
- Vask T-stykke og evt. forlænger
- Vask det sorte filter

Udstyr rengjort d. _____

Rengøres næste gang d. _____



Ved behov (= v/synligt snavs)

- Skift bakteriefiler ved synligt indvendigt snavs
- Skift ventil/modstand ved synligt indvendigt snavs



Årligt

- Skift alle dele på maskinen

Alle dele er skiftet d. _____

Skiftes næste gang i ____/____ måned/år