

Hvordan afmonteres fugter-kammeret på:

- ResMed Lumis 150 - se lige herunder
- Philips Dreamstation BiPAP – se side 2
- PrismaSmart CPAP m. fugter – se side 3

ResMed Lumis 150:

1. Hold foroven og forneden på fugteren, tryk forsigtigt på den, og træk den væk fra apparatet.



2. Åbn fugteren, og hæld evt. resterende vand ud.

Hvordan afmonteres fugter-kammeret på: Philips DreamStation BiPAP

1. Skub udløserknappen på toppen af maskinen væk fra fugter-kammeret; vip låget op




2. Løft fugter-kammeret op, og hæld evt. resterende vand ud




Hvordan afmonteres fugter-kammeret på:

PrismaSmart CPAP:

1. Tryk udløserknappen på toppen af maskinen ned og træk fugter-kammeret ud

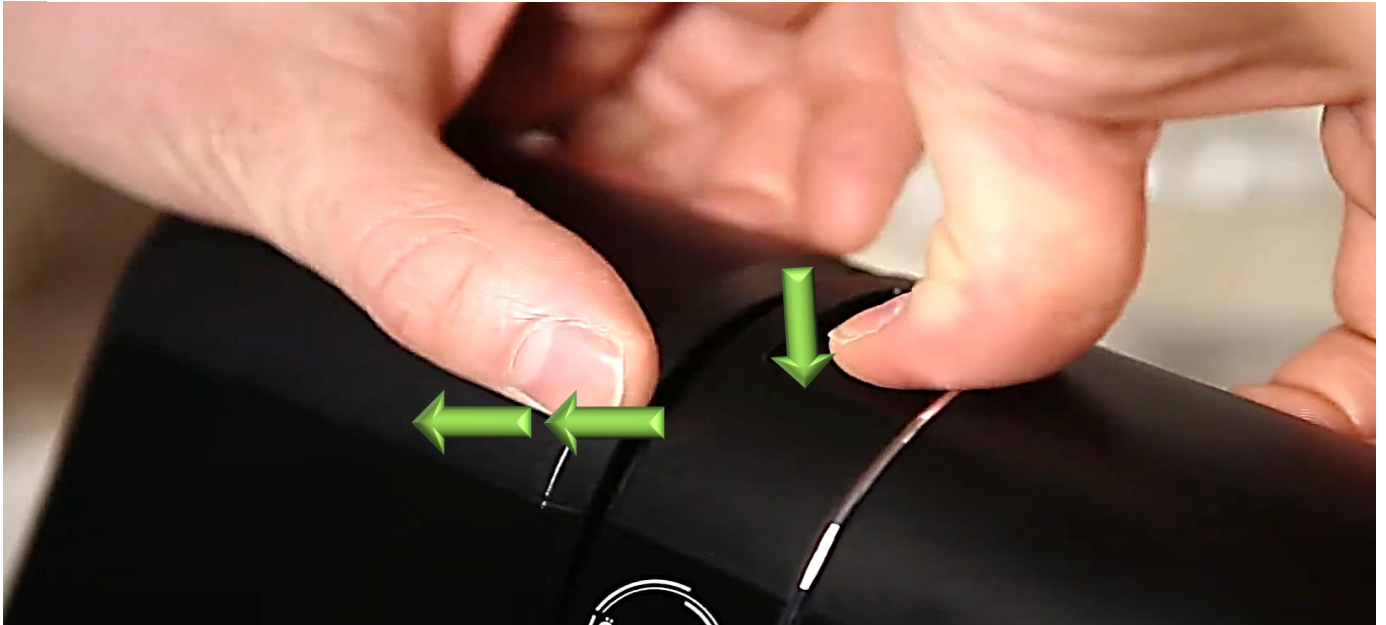

2. Træk forsigtigt opad i låget til fugter-kammeret og træk det helt af

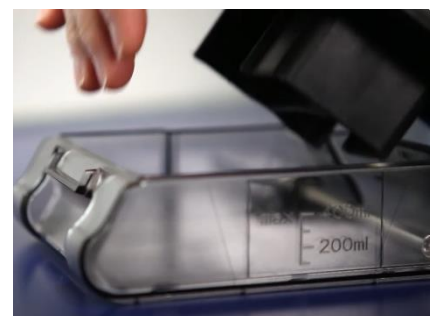

3. Træk forsigtigt indsatsen ud af låget. Rengør alle dele.

