

Rengøring af ResMed Lumis 150 maskerespirator

Supplerende vejledning ved respiratorisk overvågning



1: Placering af filter. 2: Fugterkammer



Lumis fra siden - placering af filter

Formål:

Forebygge at patienter påføres infektion i forbindelse med maskerespiratorbehandlingen. Samt sikre korrekt vedligeholdelse af apparatur.

Fremgangsmåde:

Lumis 150: Selve apparaturet rengøres med en hårdt opvredet blød klud i uparfumeret sæbevand - minimum 1 gang i måneden. Lumis 150 tåler ikke vand i de indvendige dele, så pas på med mængden af vand.

Filter: Det hvide filter er et éngangsfilter. Filtret tilses hver 14. dag. Filtret skiftes minimum hvert halve år - eller oftere, hvis det bliver misfarvet, tilstoppet med snavs og støv eller hullet.

Til rengøringen klargøres en balje med sæbevand, samt rene viskestykker. Der anbefales et mildt opvaskemiddel, som er parfumefrit og allergitestet. Det anbefales at anvende værnemidler ved rengøring og håndtering af slange og fugterkammer.

Slangesæt:

Slange rengøres 1 gang ugentligt samt ved synlig forurening.

- Slangen lægges i sæbevand. Alle dele skal være under vand, og der skal være vand inde i slangerne. Slangen skal ligge i blød i 15 min.
- Slangen skylles grundigt, så de er helt fri for sæberester. Vær opmærksom på at slangerne ikke må røre urene områder under processen.

- 
- Slangen tørres indenfor ½-1 time. Der kan bruges en føntørre med kold luft. Vær opmærksom på, at tørre grundigt og forsigtigt elektroderne (ved brug af climateline). Herefter skal slangen ligge imellem et rent viskestykke eller håndklæde til lufttørring i 1 time, inden det må samles og sættes retur på Lumis 150. Dette er for at sikre at slangesættet er helt tørt, og dermed mindske risikoen for bakterievækst i slangesættet.

Fugterkammer:

- Tømmes dagligt for vand og tørres med en ren fnugfri klud.
- Rengøres grundigt 1 gang ugentligt samt ved synlig forurening.
- Fugterkammeret skilles ad og rengøres mekanisk med brug af opvaskebørste.
- Skylles grundigt, så kammeret er helt fri for sæberester.
- Fugterkammeret tørres indenfor ½-1 time med et rent viskestykke. Herefter skal fugterkammeret ligge imellem et rent viskestykke eller håndklæde til lufttørring i 1 time. Dette er for at sikre at fugterkammeret er helt tørt, og dermed mindske risikoen for bakterievækst.

Afkalkning af fugterkammer:

Kalkaflejringer i fugterkammeret fjernes med almindelig husholdningseddike (uden farve), der blandes 1:10.

Blandingen skal stå i ca. 30 minutter, hvorefter fugterkammeret rengøres som beskrevet ovenfor.

Udskiftning af slangesæt og fugterkammer:

Ved meget svære kalkaflejringer eller anden beskaftenhed, der hæmmer, at man kan se synlig forurening og snavs, kasseres slangen og fugterkammeret.