

Procedurebeskrivelse	RENGØRING EFTER HVER PATIENT
Formål	Reducere risiko for infektionsspredning
Målgruppe	Alle der arbejder på klinikken
Udføres	ka/tp/tdl
Fremgangsmåde	Husk: • handsker • alt der tages i skuffer og skabe tages med ren pincet. • tag kun det frem på bordet som skal bruges til næste patient • skuffer og skabe skal være lukkede. 1. alle instrumenter fjernes fra bakken, dycal, glasionomer, plast og lign. fjernes fra instrumenter, synligt blod på instrumenter skylles af under rindende koldt vand. 2. pus eller saliva fjernes med sprit serviet 3. tdl., tp. og ka pincet og sprøjtespids skiftes efter hver behandling. 4. sug skylles igennem med vand efter hver behandling. 5. brugte instrumenter og andet affald samles og bæres ud i sterilisationen 6. airrotor og vinkelstykke sprittes af og køres i DAC 7. kanyler, tubuler, spidse genstande og miljøaffald samles og kommes i beholdere i sterilisationen 8. instrumenter og bor kommes i kurv til opvaskemaskine 9. Skift handsker 10. lampe, unit, patientstol, arbejdsbord aftørres med sæbevand 11. inden næste behandling, airrotor og vinkelstykke køres igennem med vand for at fjerne oliefilm, derefter 12. afspritning og tag handsker af.
Procedure revurderes	Hvert 3. år og når der kommer ændringer til retningslinje

Udarbejdet af Marianne Hasager Nielsen 13. 03. 2015.

Revideret april 2020