

Procedurebeskrivelse	FULDAUTOMATISK PROCEDURE I DAC
Formål	Reducere risiko for infektionsspredning
Målgruppe	Alle klinikassistenter der arbejder på klinikken
Udføres	Ved behov
Fremgangsmåde	1. Instrumenter monteres på adapterhåndtaget, som anbringes i bøjlen på maskinen 2. før start kontrolleres om alle lamper lyser grønt 3. tryk på start og på den blå ring 4. efter 12 min. er instrumenterne klar. 5. Adapter med instrumenter stilles til afkøling og derefter afmonteres de 6. Husk de er blevet steriliserede, men er ikke længere sterile. 7. Til alm. Tandbehandling kan de evt. anbringes i lukket skab eller i pose 8. Til kirurgiske indgreb skal de pakkes i pose og autoklaveres.
Kontrol	Der køres et teststrimmel dagligt, som sættes i adapteren. Det noteres i logbog på f-drevet. Der køres en sporeprøve hver 3. måned. Der findes en specialadapter til sporeprøven. Dette noteres ligeledes i logbog på f-drevet.
Procedure revurderes	Hvert 3. år og når der kommer ændringer til retningslinje.

Udarbejdet af Marianne Hasager Nielsen 13. 03. 2015.

Revideret april 2020