

# Rengøring af PrismaSmart CPAP

Supplerende vejledning



1: Fugterkammer. 2: Selve apparaturet

## Formål:

Forebygge at patienter påføres infektion i forbindelse med CPAP behandlingen.  
Samt sikre korrekt vedligeholdelse af apparatur.

## Fremgangsmåde:

**Prisma:** Selve apparaturet rengøres med en hårdt opvredet blød klud i uparfumeret sæbevand - minimum 1 gang i måneden. PrismaSmart tåler ikke vand i de indvendige dele, så pas på med mængden af vand.

**Filter:** Det grå filter kan rengøres. Filtret rengøres hver 14. dag.  
Filtret skiftes minimum hvert halve år - eller oftere, hvis det bliver misfarvet, tilstoppet med snavs og støv eller hullet.

Til rengøringen klargøres en balje med sæbevand, samt rene viskestykker. Der anbefales et mildt opvaskemiddel, som er parfumefrit og allergitestet. Det anbefales at anvende værnemidler ved rengøring og håndtering af slange og fugterkammer.

## Slange:

Slange rengøres 1 gang ugentligt samt ved synlig forurening.

- Slangen lægges i sæbevand. Alle dele skal være under vand, og der skal være vand inde i slangerne. Slangen skal ligge i blød i 15 min.
- Slangen skylles grundigt, så de er helt fri for sæberester. Vær opmærksom på at slangen ikke må røre urene områder under processen.

- Slangen tørres indenfor ½-1 time. Der kan bruges en føntørre med kold luft. Alternativt er lufttørring et rent sted.
- Slangen bør ligge imellem et rent viskestykke eller håndklæde til lufttørring i 1 time, inden det må samles og sættes retur på PrismaSmart CPAP. Dette er for at sikre at slangesættet er helt tørt, og dermed mindske risikoen for bakterievækst i slangesættet.



#### **Fugterkammer:**

Låget tages af.

- Tømmes dagligt for vand og tørres med en ren fnugfri klud.
- Vandbeholderen rengøres mekanisk ved brug af opvaskebørste grundigt 1 gang ugentligt samt ved synlig forurening.
- Skylles grundigt, så beholderen er helt fri for sæberester.
- Fugterkammeret tørres indenfor ½-1 time med et rent viskestykke. Herefter anbefales det at fugterkammeret ligge imellem et rent viskestykke eller håndklæde til lufttørring i 1 time. Dette er for at sikre at fugterkammeret er helt tørt, og dermed mindske risikoen for bakterievækst.

#### **Afkalkning af fugterkammer:**

Kalkaflejringer i fugterkammeret fjernes med almindelig husholdningseddike (5% - uden farve).

Husholdningseddike blandes med vand - der blandes 1 del eddike til 10 dele vand (1:10).

Blandingen hældes i fugterbunden og skal stå i ca. 30 minutter, hvorefter fugterkammeret rengøres og tørres ud fra ovenstående beskrivelse.

#### **Udskiftning af slangesæt og fugterkammer:**

Ved meget svære kalkaflejringer eller anden beskaftenhed, der hæmmer, at man kan se synlig forurening og snavs, kasseres slangen og fugterkammeret.