

Procedurebeskrivelse	DESINFEKTION I MIKROBØLGEOVN
Formål	Reducere risiko for infektionsspredning
Målgruppe	Alle klinikassistenter der arbejder på klinikken
Udføres	Ved behov
Fremgangsmåde	• Den fastsatte mængde og art af instrumenter anbringes direkte i et formstabilt kar uden låg • Instrumenterne dækkes helt af den fastsatte mængde rent koldt vand tilsat lavtskummende specialvaskemiddel. Karret anbringes i mikrobølgeovnen • Karret med instrumenter opvarmes til kogning i det antal minutter, der er fastsat under egen-valideringen, og skal herefter koge 5 minutter fra bobledannelse (samlet procestid = opvarmning til kogning + kogning 5 minutter) • Umiddelbart efter kogningen fjernes karret fra mikrobølgeovnen vha. tang eller termohandsker • Instrumenterne rengøres med ren børste i karret • Instrumenterne skylles omhyggeligt under rindende vand • Handsker tages af, og der udføres håndhygiejne • Instrumenterne tørres med et rent klæde, som lægges til vask, eller med engangspapir, som kasseres • Instrumenterne kontrolleres for urenheder • Instrumenterne lægges direkte til pakning med henblik på sterilisation
Kontrol	• Mængden og arten af instrumenter, man ønsker at desinficere, samt den mængde sæbevand, der er nødvendig for at dække disse, fastlægges • Tidsforbruget fra ovnen med den fastsatte mængde instrumenter og sæbevand i startes, til vandet koger, registreres • Dette tidsforbrug fastlægges i tre uafhængige afprøvninger, dvs. med en ny portion instrumenter og frisk sæbevand hver gang • En sådan undersøgelse bør foretages for hver ønsket kombination af instrumentmængde, instrumenttyper og vandmængde • Resultaterne registreres i et "egen-valideringsskema", der efterfølgende anvendes som grundlag for klinikens brug af mikrobølgeovnen
Procedure revurderes	Hvert 3. år og når der kommer ændringer til retningslinje