

Opbevaring og holdbarhed af sterile og steriliserede instrumenter

Metalkassetter	Opbevaret i åbent skab i behandlingsrum	1 uge
Metalkassette Efteremballeret i lukket plastpose/box	Opbevaret i åbent skab i behandlingsrum	1 år
Papir/plastposer lukket med tape	Opbevaret i åbent skab	1 uge
Papir/plastposer Efteremballeret i lukket plastpose/box	Opbevaret i åbent skab i behandlingsrum	1 år
Svejsede papir/plastposer	Opbevaret i åbent skab i behandlingsrum	1 måned
Svejsede papir/plastposer Efteremballeret i lukket plastpose/box	Opbevaret i åbent skab i behandlingsrum	1 år

Inden den sterile pakning tages i brug, skal man kontrollere om pakningen er hel og tæt, datoen ikke er overskredet og farveindikatoren har skiftet farve.

Udarbejdet af Marianne Hasager Nielsen 13. 03. 2015.

Revideret april 2020