

Sporeprøver til Autoklave og DAC.

6 stk. Attest biologiske indikatorer kapsler bruges hver gang.

Placér de 4 kapsler som skrevet nedenfor.

1. Til øverste bakke
2. Til midterstes bakke
3. Til nederste bakke
4. Kapslen pakkes i pose til autoklaven.

Tag kapslerne ud efter endt autoklavering. Kapslerne skal afkøle i min. 10 min inde dyrkning påbegyndes.

1 stk. til DAC.

5. Kapslen sættes på røret og køres med. Gælder det samme som ovenstående.

3M Attest Dampinkubatoren sættes i stik.

6. 1 stk. Attest biologisk indikatorer kapsel (ikke autoklaveret) tages frem og skal med i damp inkubatoren , dette er den som skal bruges til Test.

Anbring nu alle 6 stk. kapsler i inkubatoren, med den brune hætte opad i en vinkel på 45°. Den vil sige et let knæk som gør at kapslen knuses indeni og aktiveres.

De skal nu stå i 48 timer tændt i Dampinkubatoren.

Efter 24 timer kontrolleres kapsler, **Nr.1,2,3,4 og 5** skal gerne være Violet.

Og **Nr.6** testkapslen skal gerne være gul.

Efter de 48 timer slukkes der for den. Lad dem gerne stå i min. 15 min.

Nr. 6 testkapslen placeres i Autoklaven og køre et universal program, på 134°. Den vil efter endt program fortsat være gul, lidt mere mørk.

- **VIOLET** farve viser ingen vækst og sporeprøver er godkendt.
- **GUL** farve viser vækst og sporeprøver er ikke godkendt altså ineffektiv.

Ved ineffektiv prøver anbefales det at foretage proceduren igen, der kan være noget gået galt i processen.

Ved fortsat ineffektiv procedure bør autoklaven/DAC kontrolleres af teknisk personale.

De brugte kapsler destrueres på samme måde som andet affald.